

Guide d'Utilisation du Visualiseur en Ligne

1. Introduction

Le visualiseur en ligne est une solution moderne utilisée par Radiolab pour permettre aux patients et aux médecins d'accéder facilement et rapidement aux résultats d'examens d'imagerie médicale. Ce guide vous explique comment utiliser cet outil de manière optimale.

2. Fonctionnement

Lorsqu'un examen est réalisé chez Radiolab, un lien sécurisé est envoyé directement par e-mail ou via WhatsApp au patient ou au médecin référent. Ce lien contient un **token d'accès unique** qui vous permet de visualiser vos résultats sans avoir besoin de vous connecter avec un identifiant ou un mot de passe.

Important : Le lien est temporaire. Une fois expiré, il ne sera plus possible d'accéder aux résultats. Contactez Radiolab pour obtenir un nouveau lien si nécessaire.

3. Instructions d'Utilisation

Étape 1 : Réception du Lien

Vous recevrez un lien sécurisé par e-mail ou via WhatsApp. Cliquez simplement sur le lien pour accéder au visualiseur.

Étape 2 : Accès au Visualiseur

1. Cliquez sur le lien envoyé par Radiolab.
2. Le visualiseur s'ouvrira directement dans votre navigateur.
3. Vous aurez immédiatement accès aux images et au rapport associé.

Étape 3 : Navigation dans le Visualiseur

Le visualiseur propose plusieurs outils interactifs pour explorer vos examens :

- **Zoom :** Utilisez la molette de votre souris pour agrandir les images.
- **Déplacement :** Cliquez et faites glisser pour naviguer dans l'image.
- **Réglage des niveaux :** Ajustez la luminosité et le contraste pour une meilleure visualisation.

4. Fonctionnalités Principales du Visualiseur

a. Accès Sécurisé et Instantané

- Les patients et les médecins reçoivent un lien unique et sécurisé pour accéder directement aux examens, sans avoir à se connecter avec un identifiant ou un mot de passe.
- Le lien contient un token d'accès temporaire, garantissant une protection optimale des données.

b. Visualisation Multi-Modalités

- Compatible avec plusieurs types d'examens, notamment :
 - Radiographies
 - Tomodensitométrie (CT Scan)
 - Résonance Magnétique (IRM)
 - Échographies
- Permet l'affichage d'images haute résolution pour un diagnostic précis.

c. Navigation Intuitive

- **Zoom Interactif** : Ajustez la taille des images pour examiner les moindres détails.
- **Panoramique** : Cliquez et déplacez pour naviguer dans l'image.
- **Ajustement des Niveaux** : Réglez la luminosité et le contraste pour une meilleure visibilité.

d. Outils de Mesure

- Mesurez directement sur les images des distances, des angles ou des zones spécifiques pour une analyse approfondie.
- Idéal pour les médecins qui souhaitent effectuer des calculs précis sans logiciel supplémentaire.

e. Rapports Associés

- Accès intégré aux rapports médicaux accompagnant les images.
- Les médecins peuvent lire les conclusions en parallèle de la visualisation des examens.

f. Partage Simplifié

- Les patients peuvent partager leur lien avec leur médecin référent en toute sécurité.
 - Aucun besoin de logiciel supplémentaire pour accéder aux examens.
-

5. Sécurité et Confidentialité

Radiolab met en œuvre des mesures strictes pour garantir la sécurité de vos données :

- Le token intégré dans le lien garantit un accès sécurisé et temporaire.
 - Ne partagez pas votre lien publiquement pour éviter les accès non autorisés.
-

6. FAQ

Que faire si mon lien a expiré ?

Contactez Radiolab pour générer un nouveau lien d'accès à vos résultats.

Est-ce que le lien envoyé est sécurisé ?

Oui, le lien envoyé par Radiolab inclut un token d'accès unique et sécurisé. Ce token garantit que seules les personnes possédant le lien peuvent accéder aux examens. Il est recommandé de ne pas partager ce lien publiquement.

Puis-je partager le lien avec mon médecin ?

Oui, vous pouvez partager le lien avec votre médecin. Cependant, assurez-vous de le faire de manière sécurisée.

Mon ordinateur ne peut pas ouvrir les fichiers DICOM téléchargés. Que faire ?

Téléchargez le logiciel de visualisation DICOM gratuit fourni par Radiolab ou utilisez un logiciel compatible avec les fichiers DICOM.

Puis-je accéder aux résultats depuis un smartphone ou une tablette ?

Oui, le visualiseur en ligne est compatible avec les navigateurs mobiles et peut être utilisé sur smartphones et tablettes.

Ce guide vous aidera à utiliser efficacement le visualiseur en ligne de Radiolab pour accéder à vos examens médicaux en toute sécurité.